

Переносной транспортный инкубатор Baby Pod II



Руководство по эксплуатации и обслуживанию

Поставщик - компания [«Медицинские Системы и Технологии»](#)

Содержание:

Секция 1. Общие предупреждения и предостережения

1.1. Введение

1.2. Предупреждения

1.3. Предостережения

Секция 2. Условия применения

2.1. Описание изделия

2.2. Условия

2.3. Характеристики

2.4. Дополнительное оборудование

Секция 3. Знакомство с Baby Pod II

3.1. Схема устройства. Схема поперечного сечения устройства.

3.2. Описание элементов

Секция 4. Условия эксплуатации

Секция 5. Техника безопасности при начале эксплуатации Baby Pod II

5.1. Распаковка Baby Pod II

5.2. Осмотр Baby Pod II

5.3. Сборка Baby Pod II

5.4. Тестирование вакуумного матраца

Секция 6. Инструкции по эксплуатации

6.1. Крепление Baby Pod II к натяжному приспособлению или к каталке при транспортировке

6.2. Открытие Baby Pod II

6.3. Включение матраца для транспортировки младенцев TransWarm

6.4. Помещение ребенка в Baby Pod II

6.5. Эксплуатация вакуумного матраца

6.6. Обеспечение защиты ребенка внутри Baby Pod II

6.7. Установка дополнительного оборудования к Baby Pod II

6.8. Закрытие Baby Pod при находящемся внутри ребенке

6.9. Контроль состояния ребенка внутри Baby Pod

6.10. Извлечение ребенка из Baby Pod

Секция 7. Чистка Baby Pod

Секция 8. Обслуживание Baby Pod

Секция 9. Хранение Baby Pod

Секция 10. Выявление неисправностей

Секция 11. Заключение

Секция 1. Общие предупреждения и предостережения

1.1. Введение

Данное пособие содержит инструкцию по установке, инспектированию, корректной эксплуатации и обслуживанию переносного транспортного инкубатора Baby pod II.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пожалуйста, изучите инструкцию по эксплуатации полностью перед использованием Baby Pod II.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пациенты могут быть травмированы при некорректной эксплуатации данного устройства.

1.2. Предостережения

- Только правильно обученный персонал, имеющий представления о возможных рисках и некорректной эксплуатации может использовать Baby Pod II. Пациенты могут быть травмированы при неправильной эксплуатации устройства.
- Не оставляйте ребенка без присмотра при использовании Baby Pod II.
- Помещайте ребенка только на мягкую нетканую поверхность матраца для транспортировки младенцев TransWarm, специально разработанную с учетом кожи младенца и обеспечивающую эффект гнездования при транспортировке.
- Не налегайте на крышку Baby Pod II и не ставьте на нее никакие предметы.
- Не оставляйте открытые сосуды с жидкостью на Baby Pod II или рядом с ним. Крышка Baby Pod II не предотвращает попадания жидкости на младенца.
- Не используйте матрац для транспортировки младенцев TransWarm при температурах окружающей среды выше 28⁰С. При температурах выше 28⁰С подогревательный матрац может стать слишком горячим и вызвать травму у младенца.

1.3. Предупреждения

- Всегда проверяйте надежность натяжных фиксирующих ремней. Хомуты ремней издадут характерный щелчок при закреплении.
- Не модифицируйте и не делайте дополнительных приспособления для Baby Pod II.
- Для замены или установки должны использоваться только детали и дополнительные приспособления, доступные у официальных дилеров Baby Pod II.

- Используйте только неабразивные чистящие средства для Baby Pod II. Абразивные чистящие средства могут вызвать повреждения поверхности устройства.
- Защищайте Baby Pod II от ударов об острые и тяжелые предметы, которые могут вызвать внутренние повреждения, невидимые на поверхности устройства.
- Baby Pod II должен проверяться перед каждым использованием на наличие повреждений внешнего кожуха из углепластика. Выньте позиционные ремни для фиксации младенца, вакуумный матрас, амортизирующий материал и внимательно осмотрите внутреннюю поверхность кожуха на наличие таких повреждений, как царапины, зазоры и неровности. Прекратите использование Baby Pod II при наличии каких-либо повреждений.
- Сколы на внешней поверхности кожуха вследствие нормального износа обычно не влияют на характеристики Baby Pod II. Повреждения вследствие действия истирания или трения могут влиять на характеристики Baby Pod II и должны быть тщательно осмотрены. Прекратите использование Baby Pod II при наличии признаков истирания.

Секция 2. Условия применения

2.1. Описание изделия

Baby Pod II состоит из легковесного кожуха из углепластика с внутренним слоем из амортизирующего материала и имеет прозрачную крышку для наблюдения за ребенком. Baby Pod II имеет позиционный вакуумный матрас для пациента, натяжные фиксирующие ремни для обеспечения безопасности при транспортировке, а также предохранительные ремни для обеспечения безопасности младенца внутри устройства. Дополнительное приспособление для Baby Pod II - матрас для транспортировки младенцев TransWarm однократного применения. Baby Pod II спроектирован для обеспечения безопасной перевозки пациентов, чей вес не превышает 20 фунтов (9 кг).

2.2. Условия

Baby Pod II спроектирован для безопасной перевозки пациентов, чей вес не превышает 20 фунтов (9 кг) по средствам машины скорой помощи, самолета, вертолета, другого транспортного средства и внутри больницы. Baby Pod II прошел соответствующие краш-тесты по стандарту CEN 1789 (10G в шести направлениях).

Уникальная конструкция без металла Baby Pod II пропускает рентгеновские лучи и пригодна для МР-терапии.

Baby Pod II спроектирован с возможностью использования дополнительных опций:



Улучшенная среда O₂



Крепление шприцевых перфузоров и внешнего вентилятора

ВНИМАНИЕ! Все приспособления должны устанавливаться по распоряжению и под присмотром наблюдающего врача.

2.3. Технические требования

Технические требования по компонентам Baby Pod II представлены в таблице 1.

Таблица 1

Технические требования по компонентам Baby Pod II	
Номер компонента	Описание компонента
BP-EVO3-STD Baby Pod II	Устройство для транспортировки младенцев
WPOD2-003	Позиционные ремни для младенцев
WPOD2-006	Натяжные фиксирующие ремни

BPOD2-008	U-образная стойка
BPOD2-0014	Тюбинговый держатель
BPOD2-002	Вакуумный матрац
BP-FOAMSET	Амортизирующий материал
BP-LIDSET	Крышка
BPOD2-0013	Защитная сумка для хранения

2.4. Дополнительное оборудование

В таблице 2 представлены дополнительные приспособления, используемые с Baby Pod II.

Используйте только оригинальные дополнительные устройства для Baby Pod II.
Пациенты могут быть травмированы при некорректном использовании устройства.

Таблица 2 Дополнительные устройства к Baby Pod II	
Номер компонента	Описание компонента
NEON03	Матрац для транспортировки младенцев TransWarm однократного применения

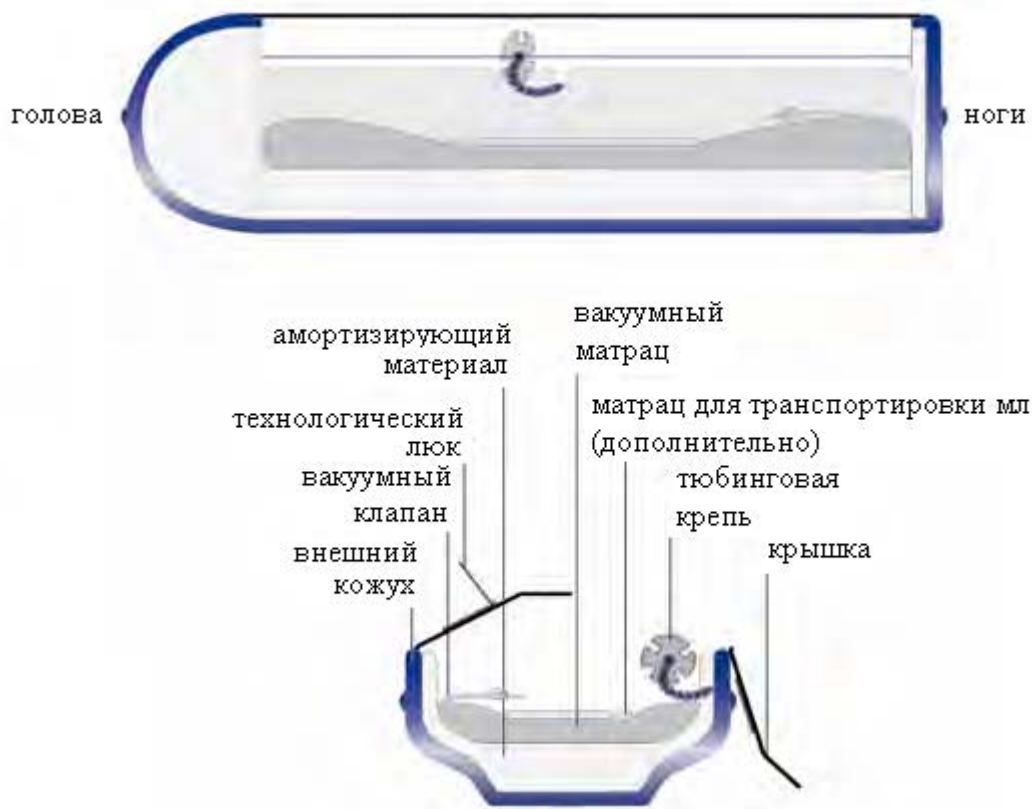


Рис. 2. Поперечное и продольное сечения Baby Pod II

3.2. Описание элементов

- Внешний кожух

Внешний кожух Baby Pod II сконструирован из углеродного волокна, заключенного в оболочку из полиэфирной смолы для обеспечения прочности и в тоже время легковесности и долговечности.

- Амортизирующий материал

Внутренний амортизирующий материал Baby Pod II выполнен из полиуретанового пенопласта.

Внутренний амортизирующий материал Baby Pod II окружает голову младенца, ноги, а также туловище в течение транспортировки и спроектирован таким образом, чтобы защитить младенца в случае удара.

- Вакуумный матрац

Вакуумный матрац Baby Pod II изготовлен из мягкой пленки и наполнен огнестойкими полистирольными шариками.

Откачка воздуха из вакуумного матраца с помощью клапанов позволяет удобно разместить ребенка внутри Baby Pod II.

- Матрац для транспортировки младенцев TransWarm.

В системе Baby Pod II установлен матрас для транспортировки младенцев TransWarm, который спроектирован для обеспечения тепла и амортизации в течение транспортировки младенца.

TransWarm изготовлен при использовании запатентованной технологии WarmGel, которая обеспечивает равномерный нагрев геля в неэлектрическом матрасе для транспортировки младенцев.

Младенцы могут помещаться непосредственно на мягкую нетканую поверхность матраса TransWarm.

- Позиционные ремни для младенцев

Позиционные ремни в Baby Pod II изготовлены из биндажа или мягкого пенопласта и крепятся на липучках.

В набор Baby Pod II входят 4 позиционных ремня длиной 30 см каждый.

В набор Baby Pod II входят 6 липучек длиной 6 см каждая, изготовленных из пропилена.

- Натяжные фиксирующие ремни

Натяжные фиксирующие ремни представляют собой конструкцию из двух боковых ремней для поперечного крепления Baby Pod II к растягивающему приспособлению или каталке и одного торцевого ремня для продольного крепления Baby Pod II к растягивающему приспособлению или каталке (рис. 1).

Натяжные фиксирующие ремни Baby Pod II изготовлены из толстого нейлонового волокна и прикрепленных к ним нейлоновых быстроразъемных фиксаторов.

- Кнопки затвора

Кнопки затвора представляют собой две черные кнопки для открытия видовой крышки Baby Pod II.

Кнопки затвора спроектированы для обеспечения безопасности устройства.

Секция 4. Условия эксплуатации

Условия окружающей среды могут незначительно влиять на использование Baby Pod II. Прочитайте следующие инструкции для получения подробной информации:

Предостережения

- Не оставляйте Baby Pod II под воздействием прямых солнечных лучей и рядом с другими источниками тепла. Внешний нагрев устройства может вызвать перегрев ребенка.

- Не используйте матрас для транспортировки младенцев TransWarm при температурах окружающей среды выше 28°C.
- Помещайте ребенка только на мягкую нетканую поверхность матраса TransWarm.
- Всегда закрепляйте Baby Pod II на каталке или другом устройстве, если есть такая возможность.
- Baby Pod II можно переносить в руках. Если предполагается использование Baby Pod II без закрепления на каких-либо приспособлениях, скрепите натяжные фиксирующие ремни специальными анкерами для удобства ручного переноса, как показано на рис. 3.



Рис. 3. Ручная переноска Baby Pod II

Секция 5. Техника безопасности при начале эксплуатации Baby Pod II

Прочитайте следующие инструкции внимательно и полно, чтобы свести к минимуму повреждения операторов и обслуживающего персонала Baby Pod II. Обратитесь к рис. 1 и таблице 1 для ясности.

5.1. Распаковка Baby Pod II

Осторожно удалите весь упаковочный материал, окружающий Baby Pod II и поставьте устройство (в защитной сумке для хранения) на ровную поверхность для осмотра.

5.2. Осмотр Baby Pod II

Осмотр Baby Pod II перед использованием должен проводиться тщательно. Следуйте следующим указаниям для того, чтобы избежать невнимательного осмотра:

- Поставьте Baby Pod II на ровную поверхность для осмотра.
- Осторожно выньте Baby Pod II из защитной сумки.

- Поверните черные кнопки затворов видовой крышки Baby Pod II в положение «открыто».
- Выньте из камеры Baby Pod II все содержимое, включая торцевой ремень, боковые ремни и U-образную стойку.

Примечание. Позиционные ремни уже закреплены. Осмотрите торцевой и боковые ремни, убедитесь в их целостности и в надежности крепления нейлоновых фиксаторов к ремням. Не используйте элементы, не прошедшие визуальный осмотр.

- Выньте вакуумный матрас из Baby Pod II. Осмотрите матрас на наличие дыр или других очевидных изъянов.
- Выньте амортизирующую прокладку. Осмотрите ее на наличие разрывов или признаков износа.
- Осмотрите внешний кожух на наличие трещин или признаков истирания. Осмотрите внутреннюю поверхность кожуха Baby Pod II.

Примечание. Гладкость не является требованием. Естественные неровности текстуры поверхности вследствие процесса изготовления являются нормой. Во-вторых, осмотрите полимерные соединения на поверхности кожуха Baby Pod II на наличие износа.

- Проверьте целостность внутри кожуха Baby Pod II. Проверьте надежность крепления позиционных ремней перед тем, как вставить амортизирующую прокладку внутрь Baby Pod II.
- Проверьте надежность крепления тубингового держателя внутри Baby Pod II. Тубинговый держатель должен плотно крепиться к Baby Pod II.
- Проверьте надежность крепления анкеров натяжных фиксирующих ремней с каждой стороны Baby Pod II (всего 5). Анкеры должны плотно крепиться к устройству.
- Осторожно закройте видовую крышку, осмотрев ее на наличие трещин или неровностей. Проверьте работу каждого шарнира. Когда Baby Pod II будет закрыт, крышка ровно лежать вдоль продольной оси устройства.
- Осмотрите технологические люки вокруг отверстий в крышке. Проверьте надежность шарниров и полную работоспособность на каждом технологическом люке.

5.3. Сборка Baby Pod

После того, как Baby Pod II полностью осмотрен и готов к использованию, его нужно собрать. Собирайте Baby Pod II, следуя следующим инструкциям:

- Поставьте Baby Pod II на ровную поверхность для сборки.

- Осторожно откройте крышки Baby Pod II.
- Поместите амортизирующие прокладки в места расположения головы и ног в Baby Pod II (Т-образная прокладка для головы и плоская для ног). Амортизирующие прокладки должны плотно лечь в специальные желоба в Baby Pod II. См. рис. 1 для сборки Baby Pod II.
- Поместите нижнюю амортизирующую прокладку и боковые амортизирующие прокладки в Baby Pod II так, чтобы позиционные ремни прошли через специальные прорези в амортизирующем материале. Тюбинговая крепь должна быть свободна от амортизирующего материала.
- Поместите вакуумный матрас так, чтобы вакуумное отверстие находилось в ногах Baby Pod II, и клапан находился вверх. Клапан должен быть в положении «открыто», чтобы воздух поступал в матрас. Руками распределите внутреннее содержимое матраса по его площади.
- Протестируйте вакуумный матрас по инструкции в п. 5.4.
- Поместите матрас TransWarm таким образом, чтобы его можно было сразу включить. После включения сразу переверните матрас мягкой нетканой стороной вверх. Кладите ребенка только на мягкую нетканую поверхность матраса.
- Прикрепите торцевой и боковые натяжные фиксирующие ремни к Baby Pod II, пользуясь рис. 1. Если соединение осуществлено правильно, вы услышите щелчок.
- Осторожно закройте крышку.
- Поверните обе кнопки затвора (рис. 1 и рис.2).

5.4. Тестирование вакуумного матраса

Клапан вакуумный матраса состоит из одного длинного патрубка и одного короткого патрубка (помечены черным «О-образным» кольцом).

Чтобы открыть клапан перед созданием вакуума, вдавите короткий патрубок в длинный. Характерный щелчок свидетельствует, что зацепление произошло, и кольца не будет видно. Вакуум работает, когда два патрубка соединены.

Клапан открыт = черного кольца не видно.

Клапан закрыт = черное кольцо видно.

Проверьте целостность клапана вакуумного матраса его открытием.

Если все сделано правильно, то вакуумный матрас должен потерять пластичность и стать плотным. Когда воздух будет откачан из вакуумного матраса, отожмите лапку, чтобы закрыть клапан. Убедитесь, что в матрас не набирается воздух, и он сохраняет свою плотную форму. Отсоедините устройство для формирования вакуума (до щелчка) и откройте клапан, чтобы матрас опять наполнился воздухом. Эта процедура подготовит матрас к работе.

Предосторожность. Если матрас не прошел данную процедуру, не используйте его.

Секция 6. Инструкции по эксплуатации

6.1. Крепление Baby Pod II к натяжному приспособлению или к каталке при транспортировке

Боковые ремни, присоединенные к анкерам, используются для закрепления Baby Pod II на каталке или других приспособлениях (рис. 4), а также при ручной переноске (рис. 3).

Поместите Baby Pod II в центр каталки и убедитесь, что расположение является верным (головная часть Baby Pod II должна соответствовать головной части каталки).

Примечание. Посмотреть расположение относительно направления движения можно на внешнем кожухе Baby Pod II.



Рис. 4. Крепление Baby Pod II к каталке

Протяните оба боковых ремня под базой каталки и защелкните с другой стороны Baby Pod II. Соединение выполнено корректно, если раздался щелчок. Затяните ремни при помощи ползуна.

Протяните торцевой натяжной фиксирующий ремень под задней стойкой каталки и обратно через ползун к защелке. Затяните ремень как можно плотнее.

Осмотрите все соединения и убедитесь в безопасности пациента при транспортировке.

6.2. Открытие Baby Pod II

Открывайте Baby Pod II осторожно поворотом кнопок затвора, находящихся в головной и задней частях.

Осторожно откройте крышку. Старайтесь не ударить крышкой окружающие предметы, это может их повредить.

6.3. Включение матраса для транспортировки младенцев TransWarm

- Найдите металлический диск и зажмите его большим и указательным пальцами обеих рук.

- Быстро поворачивайте диск до тех пор, пока не начнут образовываться кристаллы.
- Разминайте содержимое для увеличения скорости активации.
- Когда содержимое полностью активировалось, нажмите на центр ладонью, чтобы образовалась небольшая ямка.
- Положите младенца в это углубление.
- Убедитесь, что кожа младенца не покраснела, и отрегулируйте внутреннюю температуру.

Примечание. Матрац TransWarm является одноразовым, заменяйте его на новый при каждом очередном использовании.

6.4. Помещение ребенка в Baby Pod II

Положите ребенка в Baby Pod II и убедитесь, что его голова находится максимально близко к обозначению “голова” (head) (рис. 1). Неправильное расположение пациента может вызвать травмы при транспортировке.

Кладите ребенка лицом вверх, на нетканую поверхность матраца.

6.5. Эксплуатация вакуумного матраца

Убедитесь, что клапан вакуумного матраца находится в ногах у ребенка. Клапан открывается при условии, что патрубки сцеплены (не видно черного кольца).

Убедитесь, что ребенок расположен правильно для транспортировки.

Вставьте вакуумный насос в отверстие короткого патрубка в вакуумном матраце, медленно откачивайте воздух из матраца и рукой создавайте форму матраца вокруг ребенка. После откачки воздуха, вакуумный матрац фиксирует ребенка и формирует вокруг него ограничительную оболочку.

Некорректное использование вакуумного матраца может вызвать травмы у пациента при транспортировке.

Когда вакуумный матрац принял желаемую форму, отсоедините вакуумный насос от патрубка отжатием лапки и, соответственно, расцеплением патрубков (будет видно черное кольцо).

6.6. Обеспечение защиты ребенка внутри Baby Pod II

После размещения ребенка и откачки воздуха из вакуумного матраца, зафиксируйте ребенка при помощи позиционных ремней.

Возьмите один позиционный ремень со стороны ног, а другой со стороны головы и перекрестите их у ребенка на груди. Соедините ремни крючками (рис. 5). Повторите эту же операцию с другими противоположными ремнями. При правильной фиксации ремни образуют соединения в форме X у ребенка на груди, как показано на рис. 5. Ремни

должны плотно фиксировать ребенка. Некорректное использование позиционных ремней может травмировать пациента при транспортировке.



Рис. 5. Младенец, зафиксированный ремнями в Baby Pod II

6.7. Установка дополнительного оборудования к Baby Pod II

Четыре пакета или инфузионных насоса можно повесить на U-образную стойку. Для стойки в Baby Pod II есть отверстия в головной части. Для установки U-образной стойки выньте заглушки из отверстий, которые находятся над меткой «голова» в Baby Pod II. Вставьте стойку в пазы и установите на нее необходимое оборудование. Используйте пазы в крышке для подвода необходимых трубок к пациенту. Чтобы минимизировать вес, который приходится на голову ребенка, используйте специальную тубинговую крепь трубок.

Предостережение. Не пытайтесь поднимать Baby Pod II со стойкой, так как она не вмонтирована в устройство. Некорректное использование стойки может привести к травмам пациента при транспортировке.

Матрац для транспортировки младенцев TransWarm является изделием однократного применения. Заменяйте матрац при каждом очередном использовании Baby Pod II. Дополнительные матрацы можно заказать.

6.8. Закрытие Baby Pod II при находящемся внутри ребенке

Проверьте расположение ребенка перед закрытием Baby Pod II. Перепроверьте надежность фиксации позиционными ремнями.

Осторожно закройте Baby Pod II, убедившись в том, что крышка не мешает вентиляторам и трубкам. Трубки должны проходить через пазы в крышке в головной и задней частях Baby Pod II.

Закройте видовую крышку поворотом черной кнопки затвора по обеим сторонам Baby Pod II. Не перевозите ребенка с незакрытой видовой крышкой.

Убедитесь в надежности натяжных фиксирующих ремней перед транспортировкой. Если ремни ослабли, затяните их.

Убедитесь, что Baby Pod II закрыт и пациенту обеспечена безопасность.

6.9. Контроль состояния ребенка внутри Baby Pod II

Следите за состоянием ребенка при использовании Baby Pod II.

Проверяйте периодически кожу ребенка на наличие покраснений или раздражений при использовании матраса TransWarm.

Следите за температурой младенца при использовании матраса TransWarm.

Закрывайте технологические люки, чтобы минимизировать тепловые потери при транспортировке. Оставьте технологические люки закрытыми до тех пор, пока ребенку не потребуется активный уход.

6.10. Извлечение ребенка из Baby Pod II

Чтобы достать ребенка из Baby Pod II, осторожно поверните кнопки затвора в положение «открыто».

Выньте все трубки, уберите все держатели от ребенка.

Отсоедините позиционные ремни.

Откройте клапан вакуумного матраса и наполните его воздухом.

Осторожно достаньте ребенка из Baby Pod II, убедившись, что никакие провода и трубки не мешают.

Секция 7. Чистка Baby Pod II

Предупреждение. Baby Pod II должен тщательно очищаться и осматриваться после каждого использования. Обратитесь к п. 5 для проведения осмотра.

Абразивные, жесткие чистящие средства не на водной основе могут повредить внешнему кожуху Baby Pod II. Используйте только мягкие, водные, неабразивные чистящие средства. Очищайте Baby Pod II, используя мягкую, впитывающую ткань.

Очищайте внутренние элементы Baby Pod II только мягкими, водными растворами в соответствии с требованиями медицинского учреждения.

Секция 8. Обслуживание Baby Pod II

Следуйте п. 7 для общего ухода за Baby Pod II. Специфического ухода требует как внешний кожух Baby Pod II, так и вакуумный матрас:

- Внешний кожух

Baby Pod II необходимо осматривать регулярно на наличие признаков повреждения внешнего кожуха. Для более тщательного осмотра, вынимайте позиционные ремни, вакуумный матрас и амортизирующий материал и проводите осмотр внутренней поверхности углепластика на наличие царапин, шероховатостей и т. д.

Прекратите использование Baby Pod II при наличии признаков повреждения.

Внешняя поверхность Baby Pod II не влияет на целостность углеродного волокна. Сколы вследствие износа обычно не влияют на характеристики устройства. Но даже при нормальной эксплуатации Baby Pod II может нуждаться в обновлении. Свяжитесь с продавцами для получения дополнительной информации.

Проверяйте внешний кожух на наличие царапин и истираний, осматривайте внутреннюю поверхность Baby Pod II.

Примечание. Гладкость не является требованием. Естественные неровности текстуры поверхности вследствие процесса изготовления являются нормой. Во-вторых, осмотрите полимерные соединения на поверхности кожуха Baby Pod II на наличие износа.

Примечание. Наличие трещины в углепластике не всегда можно визуально оценить. Всегда проверяйте внутреннюю поверхность внешнего кожуха для внимательной оценки.

Не используйте элементы, не прошедшие визуальной проверки.

Проверьте целостность внутри кожуха Baby Pod II. Проверьте надежность крепления позиционных ремней перед тем, как вставить амортизирующую прокладку внутрь Baby Pod II. Позиционные ремни должны перекрещивать на груди у ребенка.

Избегайте повреждений Baby Pod II от ударов и острых предметов, что может вызвать внутренние повреждения, невидимые на поверхности.

Ни при каких обстоятельствах не модифицируйте Baby Pod II.

Очищайте Baby Pod II только мягкой, впитывающей тканью.

- Вакуумный матрас

Вакуумный матрас изготовлен из мягкой пленки, которая может быть легко повреждена острым предметом. Держите все острые предметы вдали от матраса во избежание внутренних повреждений.

Тестируйте вакуумный матрас перед использованием. Обратитесь к п. 5.2 и п. 5.4.

Примечание. Только оригинальные запчасти и дополнительные приспособления могут использоваться в Baby Pod II.

Секция 9. Хранение Baby Pod II

Baby Pod II необходимо хранить в защитной сумке. Оптимальной температурой хранения является 18°C – 24°C.

Секция 10. Выявление неисправностей

Основные виды неисправностей Baby Pod II представлены в таблице 3. Если возникают вопросы, касающиеся таблицы 3, обращайтесь к продавцу или производителю.

Таблица 4

Неисправности Baby Pod II		
Проблема	Возможная причина	Методы устранения
Ребенку холодно	Матрац не включен	Включите матрац перед тем, как положить ребенка в Baby Pod II
Ребенку холодно	Матрац используется по истечении двух часов	Используйте новый матрац после двух часов транспортировки
Ребенку жарко	Baby Pod II используется в недопустимых условиях	Не используйте матрац при температуре окружающей среды выше 28°C
Видимое повреждение внешнего кожуха	Повреждение острыми предметами или при ударе тупыми предметами	Осмотрите внешний кожух на наличие трещин, при необходимости замените
Хомут не закрепляется	Некорректное соединение	Отслеживайте характерный щелчок
Ребенок не зафиксирован	Не откачан воздух из вакуумного матраца	Откачайте воздух из вакуумного матраца
Ребенок не зафиксирован	Позиционные ремни некорректно закреплены	Закрепите позиционные ремни
Крышка открывается при транспортировке	Baby Pod II не плотно закрыт	Убедитесь, что кнопки затвора в позиции «закрыто»

Секция 11. Заключение

Baby Pod II спроектирован для безопасной перевозки пациентов после и перед тем, как поместить ребенка под медицинское оборудование, между отделениями и т. д. Baby Pod II состоит из легковесного кожуха из углепластика с внутренним слоем из амортизирующего материала и имеет прозрачную крышку для наблюдения за ребенком. Baby Pod II имеет позиционный вакуумный матрац для пациента, натяжные фиксирующие ремни для обеспечения безопасности при

транспортировке, а также предохранительные ремни для обеспечения безопасности младенца внутри устройства при транспортировке.

Основные шаги перед началом эксплуатации:

1. Распаковка Baby Pod II
2. Осмотр Baby Pod II
3. Сборка Baby Pod II
4. Тестирование вакуумного матраца

Инструкция по эксплуатации Baby Pod II

1. Крепление Baby Pod II к каталкам или другим приспособлениям
2. Открывание Baby Pod II
3. Включение матраца
4. Помещение ребенка в Baby Pod II
5. Использование вакуумного матраца
6. Фиксация ребенка внутри Baby Pod II
7. Дополнительные приспособления к Baby Pod II
8. Закрытие Baby Pod II с находящимся внутри ребенком
9. Наблюдение за ребенком, находящимся внутри Baby Pod II